


ZÁCHRANÁŘSKÉ BATOHY, KUFRY A BRAŠNY

PŘÍBALOVÝ LETÁK

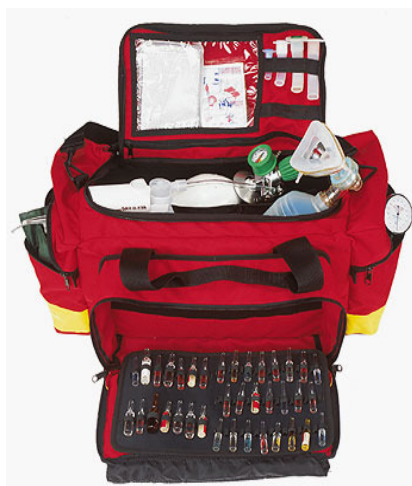

Výrobce:

BOSCAROL S.r.l.
Via G. Di Vittorio 323
39100 BOLZANO
Itálie

www.boscarol.it

Výhradní zastoupení pro ČR:

DARTIN spol. s r.o.
Suchdolská 688
252 62 HOROMĚŘICE

tel./fax.: 261 216 076
e-mail: info@dartin.cz

www.dartin.cz

1 ÚČEL VÝROBKU

Záchranářské batohy, kufry a brašny jsou určeny pro uskladnění a transport lékařského a zdravotnického materiálu potřebného při zásahu rychlé lékařské služby.

2 FUNKČNÍ POPIS

Záchranářské batohy, kufry a brašny firmy Boscarol nabízí optimální pohodlí při transportu a aplikaci lékařského zařízení v terénu a rychlý přístup ke všem komponentům ve všech typech batohů.

3 NOSNOST

Záchranářské batohy jsou určené a vyrobené pro zátěž při uskladnění nebo transportu maximálně 30 kg. Kufry pro ? kg a brašny pro ? kg. U brašen jsou však i modely malé – ledvinky a brašničky na pásek. U těchto výrobků je nosnost omezena.

4 ZIPY, PŘEZKY, KARABINY

Předcházejte poškození zipů, přezek a karabin během používání, transportu i uskladnění. Během otevírání a zavírání zipů dbejte na to, aby se do jezdce nedostala látka batohu, zipy vždy úplně otevřete, ale také úplně zavřete. Přezky je nutné během transportu a uskladnění zavírat. Upozorňujeme, že zipy, přezky ani karabiny nejsou zahrnuty v záruce.

5 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

V zájmu bezpečnosti vlastní i bezpečnosti pacientů vás upozorňujeme na následující: Před použitím batohu, kufru či brašny si laskavě přečtěte tyto pokyny. Řiďte se jimi a uschovejte je pro případ pozdější reference.

- ♦ Výrobky jsou určeny pouze pro užívání v souladu s těmito pokyny.
- ♦ Pokud jsou příslušenství a náhradní díly nahrazeny výrobky jiných výrobců, může to mít za následek omezení funkčnosti a kompatibility výrobku.
- ♦ Zabezpečte, aby eventuální únik kapalin z ampulí byl okamžitě odstraněn a vyčištěn. Ignorování tohoto pokynu by mohlo mít za následek poškození nebo i zničení materiálu výrobku a/nebo zranění a poškození uživatele. V takových případech se řiďte pokyny výrobce toho určitého přípravku.
- ♦ V zájmu prevence infekce a bakteriální kontaminace se laskavě pečlivě seznamte s odstavcem 6 „Čištění a dezinfekce“.
- ♦ Pokud je výrobek vybaven kyslíkovou lahví a dalšími přístroji, je nutné dodržovat pokyny vztahující se na používání těchto zařízení v souladu s platnými předpisy a nařízeními příslušného zdravotnického zařízení.
- ♦ Nedovolte, aby se výrobek dostal do styku s olejem a mastnotami.

6 ČIŠTĚNÍ A DEZINFIKACE

Záchranářské batohy, kufry a brašny lze čistit a dezinfikovat podle následující tabulky:

	ČIŠTĚNÍ	DEZINFIKOVÁNÍ	PRANÍ V AUT. PRAČCE
Povrch	Teplou vodou s běžným úklidovým prostředkem	Namočte do dezinfekčního roztoku	Možné prát v pračce na 40 °C, neždímejte!
Výztuž dna	Teplou vodou s běžným úklidovým prostředkem	Otřete hadříkem/houbou namočeným v dez. roztoku	Není dovoleno
Zipy, přezky, karabiny	Aplikujte pravidelně lubrikační prostředek		

Po dezinfikaci otřete všechny části batohu.

7 FUNKČNÍ ZKOUŠKA

Před každým použitím proveďte funkční zkoušku (pokud výrobek není používán pravidelně, nejméně jednou za 6 měsíců). Pokud přijdete na jakoukoliv nesrovnalost ve funkci některé součásti, výrobek nepoužívejte až do jeho opravy.

- ◆ Přezkoušejte, zda-li lze zipy otevřít úplně na obě strany. Jezdce zipů se nesmí zasekávat. Přezkoušejte, zda-li rukověti, přezky a popruhy jsou v pořádku a nepoškozené. Poškozené vyměňte.

8 ÚDRŽBA

Batohy, kufry ani brašny Boscarol nevyžadují žádnou speciální údržbu. Doporučujeme, aby eventuální opravy byly prováděny přímo u výrobce. V případě potřeby opravy se spojte se servisním střediskem firmy Dartin spol. S r.o. Znovu však upozorňujeme na nutnost provádění funkčních zkoušek před každým použitím.

9 DODÁVKA

Záchranářské batohy, kufry a brašny se dodávají prázdné, příslušenství není součástí dodávky a musí být tedy objednáno zvlášť.

10 TECHNICKÁ DATA

Záchranářské batohy, kufry a brašny patří podle klasifikace 93/42/CEE do třídy I.

Operační teplota: - 20°C až + 50°C

Teplota uskladnění: - 30°C až + 70°C

Použité materiály:

vrchní materiál: Nylon, Cordura, Tyrpol (podle modelu) vyztužené dno: plast

11 ZÁRUKA

Záruka na materiál a eventuální výrobní vady se poskytuje 2 roky ode dne převzetí zboží zákazníkem (popřípadě data fakturace). Záruka se nevztahuje na zipy, přezky a karabiny (s výjimkou případu, kdy tyto jsou nefunkční při převzetí zboží zákazníkem).

Řešení záručního případu během doby záruky se řídí všeobecným reklamačním řádem výrobce.

Reklamacce zboží nebude uznána v případě, kdy došlo k poškození zboží důsledkem nedodržení pokynů k používání, jako je nesprávným zacházením, nesprávným použitím, nebo zásahem třetí strany. V takovém případě zodpovědnost zůstává na straně zákazníka.

Všechny náklady spojené s přepravou zboží k výrobcí a zpět v případech, kdy se nejedná o uznanou reklamaci jsou zodpovědností zákazníka a budou vyúčtovány.

V případě reklamacce zboží je nutné spolu se zbožím doložit číslo faktury, kterou bylo zmíněné zboží zakoupeno.