

KANMED^o BABYWARMER

KANMED BABY WARMING SYSTÉM



Je to právě měkká
vyhřátá vodní matrace,
která dělá Kanmed
Baby Warming systém
unikátním



voda se správnou teplotou
poskytuje optimální ohřívání

37°C



Kanmed Baby Warming Filozofie



voda se správnou teplotou
poskytuje optimální ohřívání

Jen ta nejlepší péče je dostatečně dobrá pro
novorozence a předčasně narozené děti

Předčasně narozené dítě spí klidně a bezpečně na měkké vodní matraci s teplotou 37°C. Díky vodní matraci se novorozenec cítí, jako by byl vedle matčiny teplé pokožky. Jen měkká vyhřátá vodní matrace může nahradit hřejivou účinnost moderního inkubátoru.

Kanmed BabyWarmer se používá v nemocnicích po celém světě jako bezpečná a nákladově efektivní alternativa inkubátoru. Systém je dobře zdokumentován

publikovanými lékařskými studiemi* a snadno se používá. Rodiče se mohou snadno podílet na péči o svého novorozence nebo o předčasně narozené dítě, kojení může začít dříve a dítě může rychleji opustit nemocnici.

Jakmile je dítě stabilní a pokožka dozrála, může být přemístěno do Kanmed BabyWarmer. Tím se potřebný počet inkubátorů zredukuje, což šetří peníze.

* seznam literatury naleznete na poslední straně

Váš Kanmed BabyWarmer

Kanmed Baby Warmer je velmi bezpečný a jednoduchý k používání. Všechny komponenty jsou nejvyšší kvality, aby zajistily dlouhou a bezproblémovou životnost. Správné používání zajistí optimální ohřev vašeho dítěte.

VÝHODY VODNÍCH MATRACÍ KANMED

Teplá voda obsahuje spoustu energie. Proto dítě nemůže vodu ochlazovat, teplota pokožky dítěte se tím mění na teplotu vody - vodní matrace je tak nejúčinnější a nejbezpečnější způsob, jak udržet teplotu dítěte při 37°C. Vodní matrace Kanmed vytváří s dítětem tepelnou rovnováhu, dítě může většinu své



energie věnovat tomu, co je důležité - optimálnímu růstu, místo aby spotřebovávalo energii na udržení tepla. Další výhodou je, že v případě výpadku proudu vodní matrace udrží dítě bezpečně zahřívát až dvě hodiny, protože voda se ochlazuje pomalu.




ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA A MATRACE

Za CE certifikovaným systémem Kanmed BabyWarmer je 30 let zkušeností. BabyWarmer má 2 typy vyhřevných matrací, využívající stejnou vyhřívací podložku s řídicí jednotkou.

- 1 vodní matrace
- 2 gelová matrace / integrovaná gelová matrace

ÚČINNOST VYHŘÍVÁNÍ

K odhadu účinnosti vyhřívání se použila plastová láhev naplněná 500 ml vody, položená na oba typy matrace, když byly v ustáleném stavu při teplotě 37°C. Láhev byla zakrytá dvojitou vrstvou bavlněné přikrývky. Nárůst teploty vody byl postupně zaznamenáván. Jak je znázorněno níže, vodní matrace má nejvyšší přenos energie a je proto nejúčinnější topnou matrací.

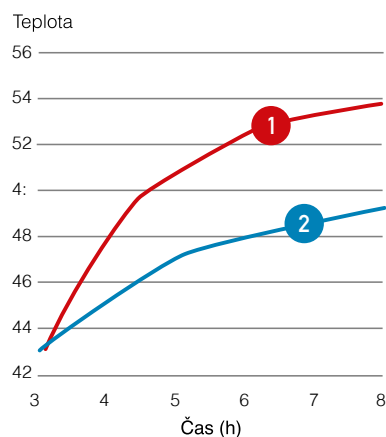

Vodní matrace

Stabilní nedonošené děti

Gelová matrace

Donošené děti

* Integrovaná gelová matrace

JEDNODNODUCHÉ POUŽITÍ

Předčasně narozené dítě můžete začít ohřívat na Kanmed BabyWarmer od okamžiku, kdy je stabilní, ale stále vyžaduje minimální klinickou intervenci, jako např. jemnou podporu dýchání.

Ke kontrole teploty novorozence lze použít standardní teplotní sondu.

- zvolte matraci, vyhovující potřebám dítěte
- do sáčku pod matrací vložte topnou podložku (nebo použijte integrovanou gelovou matraci) a celé to vložte do hnízda BabyNest
- zapněte řídicí jednotku a nastavte teplotu
- když je indikátor na řídicí jednotce zelený, teplota matrace je optimální

BENEFITY

- podporuje optimální růst
- snadné použití a čištění
- výrazné snížení nákladů ve srovnání s inkubátorem

KANMED[°] BABYWARMER

„Jen teplá měkká vodní matrace může nahradit tepelnou účinnost moderního inkubátoru“.

PROTO BYSTE MĚLI POUŽÍVAT KANMED BABYWARMER



Za posledních 30 let bylo více než dva miliony malých a předčasně narozených dětí účinně zahříváných na vodní matraci Kanmed.

- Kanmed BabyWarmer je navržen tak, aby udržoval předčasně narozené, téměř donošené nebo novorozené děti dokonale zahřáté
- díky tomu je prokázáno, že děti opouštějí inkubátor dříve, lépe spí a optimálně rostou
- měkká teplá vodní matrace Kanmed a Kanmed hnízda BabyNest poskytují podobné zahřívání a pohodlí jako u skin-to-skin klokánekování
- používání Kanmed BabyWarmer by mohlo pomoci k dřívějšímu propuštění z nemocnice a tím snížení nákladů na léčbu.
- Kanmed BabyWarmer se snadno a bezpečně používá a je velmi oblíbený u dětí, rodičů a nemocničního personálu
- máte na výběr z různých velikostí vodních matrací jako i hnízd BabyNest. Navštivte prosím www.kanmed.se

REFERENCE:

PH Gray et al, University of Queensland, Australia. Cot nursing a heated water filled mattress and incubator care. (2004). Acta Paediatrica 93:308-310 2004-03-18. Prevention of Neonatal Cold Injury in Preterm Infants. Ragnar Tunell. Ass.Professor emeritus Stockholm.

The Cochrane Collaboration.
PH Peter Gray and Vicki Flenady.
Cot nursing versus incubator care
for preterm infants.

Acta Paediatric 82:930-3. Ihsan Sarman, Ragnar Tunell, Lena Västberg, Ulla Carlquist, Gülay Can and Derya Toparlak. Mothers' perception of their preterm infants treated in an incubator or on a heated water filled mattress.

Na celém světě se používá více než 15 000 systémů,
které zahřály již více než 2 miliony dětí

Distributor pro ČR: **DARTIN**

DARTIN spol. s r. o.

Suchbolská 688, 252 62 Horoměřice
tel.: 241 470 361
e-mail: info@dartin.cz



Další informace naleznete
na www.kanmed.se

KANMED[°]
a MedCare Visions® company

Kanmed AB

Hammarbacken 6A, SE-191 49 Sollentuna, Sweden
Telephone: +46 8 564 80 630. E-mail: info@kanmed.se
www.kanmed.se